

GentleLASE - Potilasinformaatio

karvanpoistoon

pigmenttiläiskiin

pisamiin, ikäläiskiin ja melasmaan

Jalan verisuoniin

Verisuoniluomet

Kasvojen sinisiin juonteisiin

Ryppyihin

Candela GentleLASE on korkeaenerginen, pitkä-impulssinen laser, jolla voidaan hoitaa kaikkia ihotyyppejä ja erilaisia tilanteita.

Tämän kirjan tarkoituksena on tarjota ainoastaan yleistä informaatiota. Saadaksesi tietoa koskien juuri sinun tarpeitasi, keskustele lääkärisi tai kauneudenhoitajasi kanssa.

Candela Corporation
530 Boston Post Road
Wayland, MA 01778 USA
Phone: (508) 358-7637
Fax: (508) 358-5569
Toll Free: (800) 821-2013

GentleLASE on Candela Corporation:n rekisteröity tuotemerkki. Dynaaminen viilennysjärjestelmä (Dynamic Cooling device) on tuotemerkki.

Kuinka laser-hoito toimii?

Laser luo korkea-intensiivisen valonsäteen, joka tunkeutuu syvälle ihokudokseen, minne se kuljettaa kontrolloidun määrän terapeutista lämpöä. Candela:n patentoitu dynaaminen viilennysjärjestelmä-teknologia (Dynamic Cooling Device, DCM™) suojaa ihon ylempiä kerroksia kryogeenin ihoa viilentävin syöksähdyksin. Yhdessä pitkä-pulssinen laser ja DCD viilennysjärjestelmä tarjoavat optimaalisen hoidon minimaalisin sivuvaikutuksin.

Mitä voin odottaa hoidon aikana?

Hoito tehdään laser-hoitajasi vastaanotolla. Silmät suojataan hoidon aikana suojalasein laservalolta. Hoitajasi ohjaa laser-laitetta hoidettavilla alueilla pienellä kädessä pidettävällä anturilla. Kutakin laser-pulssia edeltää ja seuraa lyhyt pulssi viilennyssuihketta. Hoito kestää muutamasta minuutista noin tuntiin riippuen hoidettavasta alueesta ja muista olosuhteista.

Tekeekö hoito kipeää?

Jotkut potilaat saattavat tuntea hieman epämukavuutta laser-pulssien aikana. Joskus tunnetta on kuvattu samankaltaiseksi kuin kuminauha nipistelisi ihoa. Tätä epämukavuutta minimoidaan Candela:n viilennysjärjestelmän (DCD, Dynamic Cooling Device) avulla. Joillekin potilaille voidaan käyttää paikallispuudutusta ennen hoitoa. Keskustele asiasta hoitajasi kanssa hoitoa suunniteltaessa.

Kuinka monta hoitokertaa tarvitaan?

Hoitokertojen lukumäärä riippuu tarvittavasta hoidosta ja ihon tilasta. Karvanpoisto edellyttää yleensä vähintään n. 3 hoitokertaa tai enemmän. Toistojen tarve johtuu siitä, että hoitoprosessi on tehokasta ainoastaan karvatupen aktiivisen kasvun vaiheessa. Joissakin laserhoidoissa saattaa riittää jopa yksikin hoitokerta. Kuitenkin on huomioitava, että useat tekijät hoitotilanteessa vaikuttavat yksilöllisten laser-hoitojen tehokkuuteen.

Kuinka valmistaudun hoitoihin?

Potilaiden, joilla on aika karvanpoistoon, tulee välttää elektrolyysia tai karvanvahausta kuuden viikon ajan ennen hoitoa. Jos sinulla esiintyy/on esiintynyt herpes-virusta, ja olet varannut ajan kasvojen alueen karvanpoistoon, saatetaan ennen hoitoa määrätä ennaltaehkäisevää lääkitystä. Lisäksi hoidettavalta alueelta ajetaan karva pois ja ihosi puhdistetaan huolellisesti sekä kuivataan meikin, voiteen tai öljyn poistamiseksi alueelta ennen hoitoa.

Mitä voin odottaa hoidon jälkeen?

Potilaiden tulisi välttää aurinkoa ennen ja jälkeen hoidon ja käyttää aurinkovoidetta ulkona liikkuessaan (suojakerroin 30 tai enemmän).

Onko hoidolla sivuvaikutuksia?

Riskit ovat minimaaliset. Sivuvaikutuksiin kuuluu purpuraisuutta (laser-mustelmia), punaisuutta, poltosta, liika- tai vajaapigmentoitumista sekä turvotusta hoidetulla alueella. Oireita ei kuitenkaan yleensä kestä kuin muutaman päivän. Pysyvät sivuvaikutukset, kuten yli- tai alipigmentoituminen ovat harvinaisia.

Mitä varotoimia tulisi tehdä hoidon jälkeen?

Vältä auringolle altistumista laser-hoidon jälkeen. Älä hankaa tai huuhtelee hoidettua aluetta hiovilla ihonpuhdistustuotteilla. Hoitajasi saattaa kertoa sinulle lisävarotoimista.

Kattaako vakuutus nämä hoidot?

Yleensä vakuutusyhtiöt eivät tarjoa korvausta kosmeettisiin toimenpiteisiin. Jotkut vakuudet kattavat rumentavien syntymämerkkien, kuten verisuoniluomien hoidon. Konsultoi vakuutusyhtiötäsi tarkemman tiedon saamiseksi.